

**VARODEM**<sup>®</sup> |

The Compression Company



 *all about people*

**Productinformatie V-Flex<sup>®</sup> / VaroCare<sup>®</sup>**  
*Voor de behandelaar*

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ©copyright Varodem®, 2017



# Inhoudsopgave

Introductie V-Flex®	5
Over VaroCare® zwachtelsystemen	7
<b>VaroCare® beenverbanden</b>	
Voetverband Lite	8
Onderbeenverband Lite	8
Knieverband Lite	8
Bovenbeenverband Lite	8
Voetverband Strong	10
Onderbeenverband Strong	10
Knieverband Strong	10
Bovenbeenverband Strong	10
<b>VaroCare® armverbanden</b>	
Armverband Lite	12
Handverband Lite	12
<b>VaroSilk® hand- en teenverband</b>	
Handverband	14
Teenverband	14
<b>Accessoires</b>	
VaroCombi®	16
VaroLiner® TG Soft	16
VaroLiner® anti-bacterieel	16
Onderbeenverlenger	16
Heupband	16
Anti-slipverband	16
Midline verband	17
Polserset	17
Velcroset	17
Meetpunten	17
Bestelwijzer	18
Beslisboom	19





## V-Flex® zwachtelsystemen

Eenvoudig, effectief en kostenefficiënt zijn kernwoorden die passen bij de ontwikkeling van de nieuwe V-Flex® productlijn.

Door gebruik te maken van jarenlange ervaring in het gebruik van aanpasbare zwachtelsystemen, door te luisteren naar de gebruikers en voorschrijvers, door aan de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zelfredzaamheid en zelfmanagement gehoor te geven in combinatie met het toepassen van alle onderzoeken en protocollen, is Varodem erin geslaagd om een nieuw aanpasbaar zwachtelsysteem te ontwikkelen dat aan alle eisen voldoet:

- Evidence based
- Practice based
- Efficiënt en effectief
- Kostenbesparend
- Gebruiksvriendelijk

Traditioneel werd oedeem voornamelijk gereduceerd met behulp van zwachtels. Nu is er gelukkig VaroCare®: de "kant-en-klare" zwachtel! Efficiënter, effectiever maar vooral veel eenvoudiger in het gebruik dan een zwachtel. Het internationale ontwikkelingsteam dat aan de wieg van het V-Flex® concept heeft gestaan, bestond uit deelnemers uit Nederland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Hierbij is gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, op het gebied van compressietherapie. Het resultaat van deze unieke samenwerking, met als kernproducten in het V-Flex® assortiment de VaroCare® Lite en VaroCare® Strong, voldoet in onze ogen dan ook aan het criterium 'State of the Art'.

### Medische Indicaties

- Lymfoedeem
- Lipoedeem
- Post-traumatisch oedeem
- Chronische veneuze insufficiëntie
- Spataderen met oedeem
- Flebitis
- Erysipelas/wondroos
- Diep veneuze trombose (DVT) met oedeem
- Dependency oedeem
- (Veneuze) ulcera
- Post-sclerotherapie

### Contra-indicaties

- Matig tot ernstige arteriële aandoeningen (arm-enkel index <0,7)
- Verminderde gevoeligheid van voeten of tenen
- Onbehandelde vaatinfectie
- Ongecontroleerde (gedecompenseerd) congestief hartfalen
- Onbehandelde of gevorderde huidaandoeningen
- Zwelling van voet of been met onbekende oorzaak
- Gevorderd perifeer vaatlijden
- Onbehandelde open wonden

### Relatieve contra-indicaties

- Perifere neuropathie bij diabetes mellitus
- Decompensatio cordis



Kleuren



# Over VaroCare® zwachtelsystemen

## Algemeen

VaroCare® is een uniek aanpasbaar zwachtelsysteem dat op een effectieve manier helpt om de vochtophoping (oedeem) in zowel handen, armen, voeten en benen terug te dringen.

## Eenvoud

VaroCare® ondersteunt de behandeling van aandoeningen die zwellingen veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie, lymfoedeem of post-traumatische oedemen. VaroCare® producten zijn bovendien eenvoudig aan te brengen, met als doel het zelfmanagement te stimuleren, en het aanleggen van een compressief zwachtelverband te vereenvoudigen. Daar waar het goed aanbrengen van een compressieve zwachtel het resultaat is van een gedegen scholing en training, is het VaroCare® zwachtelsysteem zó eenvoudig in gebruik, dat de eindgebruiker het in de meeste situaties zelf kan aanbrengen en afdoen. Wij durven te stellen dat het VaroCare® zwachtelsysteem het eenvoudigste compressiehulpmiddel is. De kracht van VaroCare® zwachtelsystemen schuilt in de unieke combinatie van het ultra korte-rek basismateriaal, het doordachte anatomisch ontwerp en stevige en duurzame klittenbandsluiting samengevoegd volgens het V-Flex® principe.

## Efficiënt en effectief

Eenmaal gesloten doet het VaroCare® zwachtelsysteem zijn werk. De ultra korte-rek zorgt ervoor dat het oedeem gereduceerd wordt. Het unieke van de VaroCare® producten is dat zodra het oedeem afneemt in de loop van de dag, het verband snel en eenvoudig bijgesteld kan worden zodat de werkdruk optimaal blijft en het VaroCare® zwachtelsysteem opnieuw aan het werk kan.

## Mobiliteit

VaroCare® verhoogt de mobiliteit en geeft de druk die aansluit bij de dagelijkse bezigheden van de eindgebruiker, meer druk tijdens actieve momenten en juist minder druk tijdens rustmomenten. Zodra het behandelde lichaamsdeel met behulp van het VaroCare® zwachtelsysteem oedeemvrij is gemaakt, kan er vervolgens een therapeutische elastische kous worden aangemeten om het behaalde resultaat te behouden.

## Breed inzetbaar

VaroCare® compressiehulpmiddelen zijn zo ontworpen dat zij in combinatie gebruikt kunnen worden met andere producten uit de V-Flex® productlijn, bijvoorbeeld een VaroCare® Lite onderbeenverband in combinatie met een VaroCare® Strong voetverband. Ook is de VaroCare® heel goed te combineren met de VaroSilk® hand- en teenverbanden. Niet alle oedemen worden met dezelfde drukwaarde behandeld. Daarom biedt het VaroCare® assortiment een tweeledige oplossing: VaroCare® Lite en VaroCare® Strong. De producten worden vervaardigd met nylon en andere kunstvezeltextielen; er wordt geen latex gebruikt.

*Huidvriendelijke siliconenband*



*VaroCare® multifunctioneel voetverband*





## Toepassing

De VaroCare® Lite zwachtelsystemen voor de onderste extremiteiten zijn compressiehulpmiddelen met ultra korte-rek eigenschappen, bedoeld voor het reduceren van **milde tot gemiddelde oedemen** in voet, onderbeen, knie en bovenbeen. Een VaroCare® Lite verband kan gecombineerd worden met alle overige producten uit het V-Flex® assortiment. De onderbeen- en bovenbeenverbanden zijn links en rechts specifiek. Het voet- en knieverband zijn ambidexter, deze kunnen dus zowel links als rechts gebruikt worden.

## Kenmerken

- Voorzien van de unieke V-Flex® compressiestabilisator op de kuit
- Gedurende het dragen in druk aanpasbaar zodat het optimale compressierendement behaald wordt
- Doordat de gebruiker het product zelf kan hanteren, wordt de zelfredzaamheid bevorderd (denk aan: douchen of het individueel aanpassen van de compressie)
- Compressie mogelijk tot 40 mm/Hg
- Oogt vriendelijk en voelt zacht aan
- Beschikbaar in de kleur beige en de kleur zwart
- Te dragen in schoeisel
- Overdag en 's nachts te dragen
- Goed wasbaar/onderhoudsvriendelijk
- In combinatie met een therapeutische elastische kous te dragen

## Medische indicaties

- Venus oedeem
- Lymfoedeem (in milde vorm)
- Dependency oedeem
- Diep veneuze trombose bij kleinere omvangen
- Erysipelas bij kleinere omvangen
- Lipoedeem
- Bijna genezen ulcus cruris venosum
- Als toevoeging te dragen over een therapeutische elastische kous, daar waar de kous alleen niet volstaat om de zwelling te beteugelen

VaroCare® Lite onderbeen-, knie- en bovenbeenverbanden zijn voorzien van een ingewerkte liner en een huidvriendelijke siliconenband voor extra fixatie. Dit zorgt voor een ongeëvenaard gebruiksgemak.

## Samenstelling

85% polyamid, 15% elastane





## VaroCare® Lite

Voetverband  
 Onderbeenverband  
 Knieverband  
 Bovenbeenverband

### Maattabellen (in cm)

Voetverband	XS	S	M	L	XL
cA (omvang voorvoet)	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
Lengte: normaal	16,5	18	19,5	21	23
Lengte: lang	18,5	20	21,5	23	25
Onderbeenverband	XS	S	M	L	XL
cB (omvang enkel)	20-27	25-32	30-38	37-44	45-52
cC (omvang kuit)	35-45	40-52	48-60	55-65	60-70
Lengte: normaal	37	37	42	42	44
Lengte: lang	42	42	47	47	49
Knieverband	XS	S	M	L	XL
cD (omvang 2 cm onder knie)	35-45	40-52	48-60	55-65	60-70
cF (omvang 10 cm boven patella)	40-55	50-65	60-75	70-85	85-100
Bovenbeenverband	XS	S	M	L	XL
cF (omvang 10 cm boven patella)	45-52	53-59	60-66	67-73	74-80
cG (grootste omvang)	50-65	60-75	70-80	75-90	85-100
Lengte: normaal	23	23	23	23	23
Lengte: lang	29	29	29	29	29

### Kleuren





## Toepassing

De VaroCare® Strong zwachtelsystemen voor de onderste extremiteiten zijn compressiehulpmiddelen met ultra korte-rek eigenschappen, bedoeld voor het reduceren van **gemiddelde tot ernstige oedemen** in voet, onderbeen, knie en bovenbeen. Een VaroCare® Strong verband kan gecombineerd worden met alle overige producten uit het V-Flex® assortiment. De onderbeen- en bovenbeenverbanden zijn links en rechts specifiek. Het voet- en knieverband zijn ambidexter, deze kunnen dus zowel links als rechts gebruikt worden.

## Kenmerken

- Voorzien van de unieke V-Flex® compressiestabilisator
- Gedurende het dragen in druk aanpasbaar zodat het optimale compressierendement behaald wordt (snelle oedeem reductie)
- Doordat de gebruiker het product zelf kan hanteren, wordt de zelfredzaamheid bevorderd (denk aan: douchen of individuele bijstelling van de compressie)
- Compressie mogelijk tot 60 mm/Hg
- Oogt vriendelijk en voelt zacht aan
- Beschikbaar in de kleur beige en de kleur zwart
- Te dragen in schoeisel
- Overdag en 's nachts te dragen
- Goed wasbaar/onderhoudsvriendelijk
- In combinatie met een therapeutische elastische kous te dragen

## Medische indicaties

- Venus oedeem bij grotere omvangen
- Lymfoedeem
- Dependency oedeem
- Diep veneuze trombose bij grotere omvangen
- Lipoedeem
- Bijna genezen ulcus cruris venosum
- Als toevoeging te dragen over een therapeutische elastische kous, daar waar de kous alleen niet volstaat om de zwelling te beteugelen.

VaroCare® Strong onderbeen-, knie- en bovenbeenverbanden zijn voorzien van een ingewerkte liner en een huidvriendelijke siliconenband voor extra fixatie. Dit zorgt voor een ongeëvenaard gebruiksgemak.

## Samenstelling

85% polyamid, 15% elastane



## Maattabellen (in cm)

Voetverband	XS	S	M	L	XL
cA (omvang voorvoet)	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
Lengte: normaal	16,5	18	19,5	21	23
Lengte: lang	18,5	20	21,5	23	25

Onderbeenverband	XS	S	M	L	XL
cB (omvang enkel)	20-27	25-32	30-38	37-44	45-52
cC (omvang kuit)	35-45	40-52	48-60	55-65	60-70
Lengte: normaal	37	37	42	42	44
Lengte: lang	42	42	47	47	49

Knieverband	XS	S	M	L	XL
cD (omvang 2 cm onder knie)	35-45	40-52	48-60	55-65	60-70
cF (omvang 10 cm boven patella)	40-55	50-65	60-75	70-85	85-100

Bovenbeenverband	XS	S	M	L	XL
cF (omvang 10 cm boven patella)	45-52	53-59	60-66	67-73	74-80
cG (grootste omvang)	50-65	60-75	70-80	75-90	85-100
Lengte: normaal	23	23	23	23	23
Lengte: lang	29	29	29	29	29

## VaroCare® Strong

Voetverband  
 Onderbeenverband  
 Knieverband  
 Bovenbeenverband

### Kleuren





## Toepassing

De VaroCare® Lite zwachtelsystemen voor de bovenste extremiteiten zijn compressiehulpmiddelen met ultra korte-rek eigenschappen, bedoeld voor het reduceren van gemiddelde tot ernstige oedemen in de hand en/of arm. Een VaroCare® Lite armverband kan gecombineerd worden met alle overige producten uit het V-Flex® assortiment. De armverbanden zijn links en rechts specifiek.

De handverbanden zijn bijzonder geschikt om oedeem in de handrug te behandelen. Bij elk handverband worden twee pelotten meegeleverd, in twee verschillende diktes. Deze pelotten kunnen op maat geknipt worden, en worden aangebracht op plaatsen waar extra druk nodig is. Pelotten worden altijd in combinatie gedragen met een VaroSilk® handverband of een gebreide handschoen en worden niet op de blote huid gedragen.

## Kenmerken

- Snelle en patiëntvriendelijke oedeemreductie door de mogelijkheid tot continue drukaanpassingen gedurende de dag
- Goed door de patiënt zelf te hanteren dankzij de ingewerkte liner
- Doordat de gebruiker het product zelf kan hanteren, wordt de zelfredzaamheid bevorderd (denk aan: douchen)
- Compressie mogelijk tot 40 mm/Hg
- Oogt vriendelijk en voelt zacht aan
- Verhoogt de therapietrouw
- Beschikbaar in de kleur beige en de kleur zwart
- Overdag en 's nachts te dragen
- Goed wasbaar/onderhoudsvriendelijk
- Als toevoeging te dragen over een therapeutische elastische kous, daar waar de kous alleen niet volstaat om de zwelling te beteugelen

## Medische indicaties

- Lymfoedeem
- Post-traumatisch oedeem
- Diep veneuze trombose in armveneren/subclavia
- Vaatontstekingen
- Lipoedeem

VaroCare® Lite zwachtelsystemen voor de arm zijn voorzien van een ingewerkte liner. Dit zorgt voor een ongeëvenaard gebruiksgemak. Aan de bovenzijde van het armverband is een siliconenboord aangebracht om afzakken te voorkomen.

## Samenstelling

85% polyamid, 15% elastane



## VaroCare® Lite

### Handverband Armverband

#### Maattabellen (in cm)

Handverband	XS	S	M	L
cA (omvang inplant vingers)	<18	18-20	20-22	>22

Armverband	XS	S	M	L	XL
cC (omvang pols)	14-16	17-19	20-22	23-25	24-27
cE (omvang elleboog)	23-26	26-30	29-34	33-39	38-42
cG (omtrek bovenarm)	25-28	29-33	34-39	40-45	46-50
Lengte: normaal	42-47	42-47	42-47	42-47	42-47
Lengte: lang	46-50	46-50	46-50	46-50	46-50

#### Kleuren





VaroSilk® is de opvolger van het bekende Microfine hand- en teenverband.

## **VaroSilk® handverband**

VaroSilk® handverband is bedoeld voor het reduceren van lichte zwelling in de handrug en vingers, daar waar het gebruik van een therapeutische elastische kous te zwaar is. Het VaroSilk® handverband kan ingezet worden in plaats van een zwachtel en is verkrijgbaar in beige en zwart.

### **Kenmerken**

- Fijne naden met comfortabele stukken tussen de vingers (het zogenaamde boxmodel), gecombineerd met ultra dun en zacht materiaal
- Oogt mooi en is prettig in het dragen
- Zowel overdag als 's nachts te dragen
- Kan zowel links als rechts gedragen worden
- Het VaroSilk® handverband is op maat te knippen. De vingers kunnen op lengte geknipt worden zonder dat het product rafelt of dat er afbreuk gedaan wordt aan de materiaaleigenschappen
- Stimuleert de mobiliteit
- Het VaroSilk® handverband is bij uitstek geschikt om te combineren met het VaroCare® Lite handverband

### **Indicaties**

- Lymfoedeem
- Post-trombotisch oedeem

## **VaroSilk® teenverband**

VaroSilk® teenverband wordt ingezet bij lichte zwelling in de tenen en teenaanzet/voorvoet. VaroSilk® teenverband is eventueel onder een therapeutische elastische kous te dragen bij bijv. dependency oedemen. De naad van het teenverband dient aan de bovenzijde van de voet gedragen te worden. Het teenverband is voor de rechtervoet voorbereid. Indien het teenverband voor de linkervoet bestemd is, dient het binnenstebuiten gekeerd te worden. VaroSilk® producten zijn verkrijgbaar in de kleuren beige en zwart.

### **Kenmerken**

- Fijne naden
- Oogt mooi en is prettig in het dragen
- Zowel overdag als 's nachts te dragen
- Kan zowel links als rechts gedragen worden
- Het VaroSilk® teenverband is op maat te knippen. De tenen kunnen op lengte geknipt worden zonder dat het product rafelt of dat er afbreuk gedaan wordt aan de materiaaleigenschappen
- Stimuleert de mobiliteit
- Het VaroSilk® teenverband is bij uitstek geschikt om te combineren met het VaroCare® Lite voetverband

### **Indicaties**

- Lymfoedeem
- Venus oedeem



**VaroSilk®**

*Handverband  
Teenverband*

*Maattabellen (in cm)*

VaroSilk® Handverband				
Meetpunten	XS	S	M	L
cA (omvang aanzet vingers)	< 18	18-20	20-22	> 22
cB (omvang handpalm)	< 19	19-21	21-23	> 24

VaroSilk® Teenverband				
Meetpunten	XS	S	M	L
cA (omvang voorvoet)	21-23	23-25	25-27	27-29

**Kleuren**



## **VaroCombi® voetverband (hybride werking)**

Het VaroCombi® voetverband is een buisverband waarbij het voetgedeelte een hogere compressie heeft dan het onderbeen gedeelte. Het VaroCombi® voetverband ondersteunt oedemateuse aandoeningen die de voet betreffen, zoals veneuze insufficiëntie of mild lymfoedeem. Het VaroCombi® voetverband is specifiek ontworpen om in combinatie met het VaroCare® beenverband te gebruiken om zo zwelling van de voet en het been te bestrijden. VaroCombi® is verkrijgbaar in beige en zwart en altijd met een gesloten teen.

## **VaroLiner® TG Soft (100% katoen)**

VaroLiner® TG Soft wordt ingezet als extra bescherm laag, voor een optimaal draagcomfort, onder VaroCare® beenverbanden te dragen. Het buisverband wordt ter bescherming over de huid geschoven. Hier overheen wordt de VaroCare® aangebracht. Het materiaal waarvan TG Soft is gemaakt, is zacht en verdeelt de druk uitstekend. Bij gebruik van een VaroLiner® TG Soft hoeft u de ingewerkte liner in het VaroCare® onderbeenverband niet te gebruiken

### **Maten**

- VaroLiner® TG Soft maat S met open teen, witte kleur (AD)
- VaroLiner® TG Soft, maat L met open teen, witte kleur (AG)  
U kunt zelf de buisverbanden op maat knippen

## **VaroLiner® anti-bacterieel**

VaroLiner® anti-bacterieel wordt ingezet als bescherm laag van de huid, voor een optimaal draagcomfort. Het buisverband wordt ter bescherming over de huid geschoven. Hier overheen wordt de VaroCare® aangebracht. VaroLiner® anti-bacterieel wordt geleverd als AD (been) of CG onderkous (arm). Bij gebruik van een VaroLiner® anti-bacterieel hoeft u de ingewerkte liner in het VaroCare® niet te gebruiken

### **Maten**

- VaroLiner® anti-bacterieel been, S/M met teenstuk, grijze kleur (AD)
- VaroLiner® anti-bacterieel been, L/XL met teenstuk, grijze kleur (AD)
- VaroLiner® anti-bacterieel arm, S t/m L, grijze kleur (CG)

## **VaroCare® verlenger**

Als de lengte van een VaroCare® onderbeenverband ontoereikend is, kunt u het onderbeenverband simpelweg verlengen met behulp van deze verlengband. Onderbeenverband verlengers zijn verkrijgbaar in Lite en Strong in de kleuren beige en zwart.

### **Kenmerken**

- Afmeting: verlenger Lite is 9 cm breed bij 60 cm lang en verlenger Strong is 12 cm breed en 60 cm lang
- Verkrijgbaar in één maat, mocht de verlenger te lang of te breed zijn, dan kan deze eenvoudig op maat geknipt worden
- De verlenger is inzetbaar bij omvangen tot 75 cm. Bij grotere omvangen bestaat de mogelijkheid om twee verlengers aan elkaar te bevestigen doormiddel van het bijgeleverde klittenband

## **VaroCare® heupband**

Deze speciaal ontwikkelde heupband bestaat uit een heupstuk voorzien van klittenband en een tailleband. De VaroCare® heupband wordt ingezet voor het fixeren van een VaroCare® bovenbeenverband in geval van afzakproblemen.

## **VaroBand® antislipverband (afmeting 12 x 115 cm)**

VaroBand antislipverband is een ultra korte-rek verband welke ingezet kan worden bij het fixeren van de VaroCare® verbanden. Het antislipverband heeft een griplaag en is gemaakt van Neopreen met een kunstvezel textiele topping en zijn verkrijgbaar in beige en zwart.



## Accessoires

### VaroBand® midlineverband (afmetingen 12 x 150 cm en 20 x 150 cm)

Het VaroBand® midlineverband zijn ultra korte-rek verbanden die worden ingezet bij het behandelen van oedemen in het midline gebied. Het midlineverband is gemaakt van Neopreen met een kunstvezel textiele topping en is verkrijgbaar in beige en zwart.

### VaroCare® polsterset

VaroCare® polstersets worden ingezet om plaatselijk extra druk te kunnen geven onder een V-Flex® verband. De polsters mogen niet direct op de huid gedragen worden.

De polsters zijn 4 mm en 8 mm dik en verkrijgbaar per set van twee in vier afmetingen (9x9 cm, 10x10 cm, 11x11 cm en 12x12cm).

### VaroCare® velcrosset


Als aanvulling op de verwerkte klittenbanden of als vervanging is er een klittenbandset verkrijgbaar:

- VaroCare® velcrosset set arm
- VaroCare® velcrosset set been


U ontvangt twee strips waarvan u zelf de klittenbanden op maat kunt knippen.

## Meetpunten


### Beenverbanden

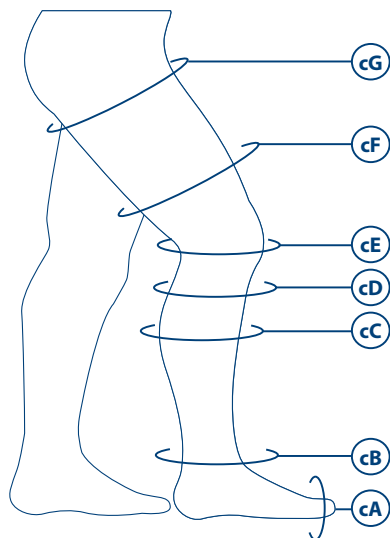

### Armverbanden

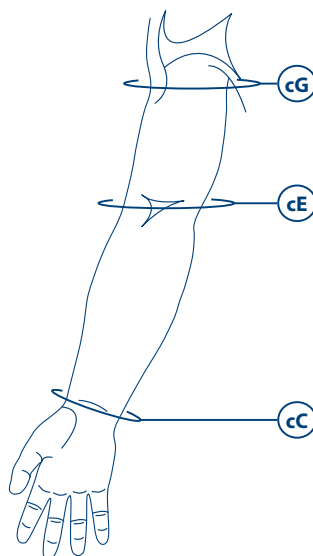

### Handverbanden

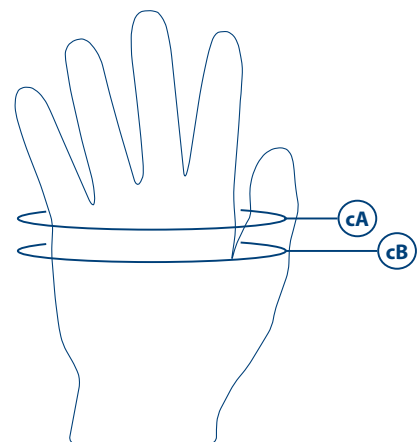

## Bestellen

Wat heeft u nodig om een V-Flex® (assortiment) product te bestellen? Wij raden aan om u te laten trainen in het aanmeten van de zwachtelsystemen. Onze productspecialisten komen graag kosteloos bij u op locatie om u een demonstratie te geven van het aanmeten van de verschillende producten. Het aanmeten is zeker niet moeilijk, u dient alleen te weten waar de meetpunten zich bevinden.

Na de training kunt u zelf aan de slag. U heeft hiervoor een volledig ingevuld bestelformulier nodig. De volgende gegevens dienen hierop vermeld te staan:

- Ingevuld zorgplan
- Naam en adres gegevens patiënt
- Verzekeringsgegevens (naam zorgverzekeraar en polisnummer)
- Burgerservicenummer patiënt
- Naam en adres gegevens arts/verpleegkundig specialist
- Handtekening arts/verpleegkundig specialist
- Maat, kleur en aantal producten
- Datum bestelling

Bestelformulieren zijn te downloaden via de website [www.varodem.nl/download](http://www.varodem.nl/download)

## Onderhoud, behandeling en garantie

V-Flex® producten worden met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor uw patiënten vervaardigd. Deze bijzondere en individuele benadering garandeert het hoge kwaliteitsniveau dat wij nastreven. Bij het dagelijks gebruik van onze producten dient men deze met de nodige zorg en aandacht te behandelen. Om uw patiënten hierover te informeren treft u bij elk product een wasvoorschrift en een aantrekinstructie aan.

## Service

Het retourneren van V-Flex® zwachtelsystemen is niet mogelijk. Varodem hanteert hierbij dezelfde regels als de landelijke apotheken.

Heeft u ondersteuning nodig bij het bestellen van uw V-Flex® producten, neem ook dan contact op met een van de medewerkers van ons servicekantoor via 0475-589302. Zij, maar ook onze productspecialisten, helpen u graag. Op verzoek geven onze productspecialisten ook workshops op locatie om u uitvoerig te informeren over alle mogelijkheden die het Varodem assortiment te bieden heeft.

# V-Flex® beslisboom

## Lipoedeem

### Lite

- bij kuitomvang (cC) kleiner dan 50 cm
- bij pijnklachten compressie

#### Oedeem in de voet?

**Ja:** Voetverband Lite

**Nee:** VaroCombi® voetverband

#### Oedeem in de knie:

- knieverband

#### Oedeem in bovenbeen:

- bij immobiele mensen --> bovenbeenverband
- bij actieve mensen --> TinkFit® CT of Curetex® CT

### Strong

- bij kuitomvang (cC) groter dan 50 cm
- geen pijnklachten compressie

#### Bij sterk uitlopende benen?

- Antislipverband
- Polsteren
- Voor het liften van de enkel cuffs --> extra band voetverband of verlengband

## Lymfoedeem been

### Lite

- bij kuitomvang (cC) kleiner dan 35 cm
- bij dragen over TEK bij kleine omvangen

#### Oedeem in de voet en tenen?

- VaroCombi® voetverband en/of
- VaroSilk® teenverband

### Strong

- bij kuitomvang (cC) groter dan 35 cm
- i.p.v. kous
- over de kous
- bij induraties

## Lymfoedeem arm

### Lite

- bij induraties (combineren met fibrose pad/pelot
- eerste keer altijd VaroSilk® meebestellen
- Bij afzakken --> anti-slipverband

Handoedeem →

**Ja:** handverband Lite + VaroSilk® handverband  
**Nee:** alleen VaroSilk® handverband

## Veneus oedeem

### Lite

- bij kuitomvang (cC) kleiner dan 50 cm
- inactiviteitsoedeem
- tromboflebitis
- trombose bovenbeen (omvang groter dan 70 cm)

#### bij enkel:

- voetoedeem: **VaroCombi® voetverband**
- teenoedeem: **VaroSilk® teenverband of Feelgood® teenverband**

### Strong

- bij kuitomvang (cC) groter dan 50 cm
- trombose in kuit of trombose bovenbeen (omvang groter dan 70 cm)
- bij krachtverlies in de handen

### Algemeen

- Te kort onderbeenverband: verlengband
- Afzakken bovenbeenverband: heupband
- Afzakken onderbeenverband: anti-slipverband

*Toepasbaarheid: V-Flex® wordt ingezet bij chronisch oedeem (langer dan drie weken) voor reductie of consolidatie (i.p.v. TEK).*

*Het voet- en onderbeenverband kan eventueel aangevuld worden met VaroSilk® teenverband, VaroCombi® voetverband, TG softliners of de AD zilverliners.*

**Varodem® BV**  
Postbus 4717  
6085 ZG Horn  
T: 0475 589 302  
F: 0475 582 779  
E: [info@varodem.nl](mailto:info@varodem.nl)  
I: [www.varodem.nl](http://www.varodem.nl)

